

**Bedeutung der Fehlercodes Schutzabschaltung / Sicherheitsabschaltung
„transfusio-therm 2000“** **Controllerversion 7 und 8**

Code	Fehler	
0	Türschalter unterschiedliche Signale	Schutzabschaltung Gerät
1	Fehler Schwenken/ blockiert oder Schutzabschaltung 2.System	Schutzabschaltung Gerät
2	Fehler Schwenken/ überdreht	Schutzabschaltung Gerät
3	Fehler Magnetron/ schaltet nicht ein oder Schutzabschaltung 2. System	Schutzabschaltung Gerät
4	Fehler Magnetron/ schaltet nicht aus	Schutzabschaltung Gerät
5	Fehler Antenne/ dreht zu langsam	Schutzabschaltung Gerät
6	fehlerhafter Selbsttest	Schutzabschaltung Gerät
7	T1...T6 > 41°C	Schutzabschaltung Gerät
8	Belegtsensor 1 auf, Belegtsensor 2 zu	Schutzabschaltung Aufnahme 1
9	Belegtsensor 2 auf, Belegtsensor 1 zu	Schutzabschaltung Aufnahme 1
10	Temperaturdifferenz > 1°C	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 1
11	Kabelbruch an Temp.-sensor	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 1
12	T1 oder T2 > 39°C	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 1
13	Aufnahme undicht (HF)	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 1
14		
15		
16	Belegtsensor 1 auf, Belegtsensor 2 zu	Schutzabschaltung Aufnahme 2
17	Belegtsensor 2 auf, Belegtsensor 1 zu	Schutzabschaltung Aufnahme 2
18	Temperaturdifferenz > 1°C	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 2
19	Kabelbruch an Temp.-sensor	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 2
20	T1 oder T2 > 39°C	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 2
21	Aufnahme undicht (HF)	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 2
22		
23		
24	Belegtsensor 1 auf, Belegtsensor 2 zu	Schutzabschaltung Aufnahme 3
25	Belegtsensor 2 auf, Belegtsensor 1 zu	Schutzabschaltung Aufnahme 3
26	Temperaturdifferenz > 1°C	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 3
27	Kabelbruch an Temp.-sensor	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 3
28	T1 oder T2 > 39°C	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 3
29	Aufnahme undicht (HF)	Sicherheitsabschaltung Aufnahme 3
30		
31		