

transfusio-therm[®] 2000 P





„Plasma fast thawing“

BITTE BEACHTEN! – ATTENTION PLEASE!

**Gerät nur zum Auftauen von Plasma
(FFP/GFP) verwenden!**

Only use for plasma (FFP) thawing!

Beutel wie auf dem Piktogramm in den Halter legen!
Put the bag in the holder – like on the ideogramm!

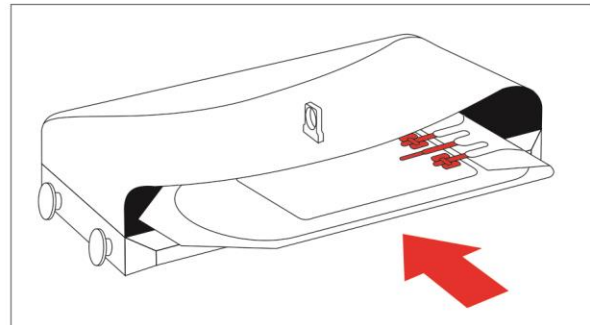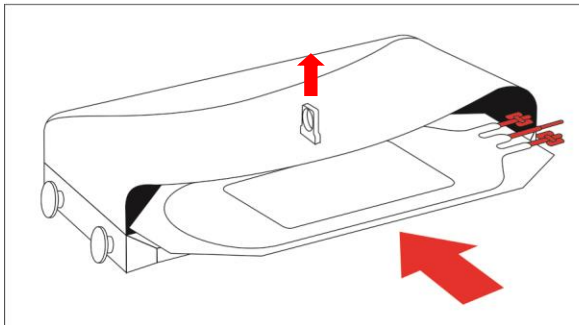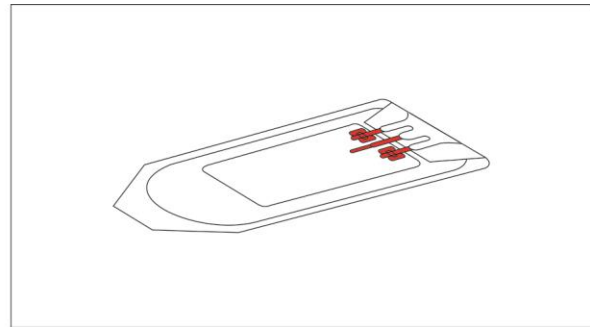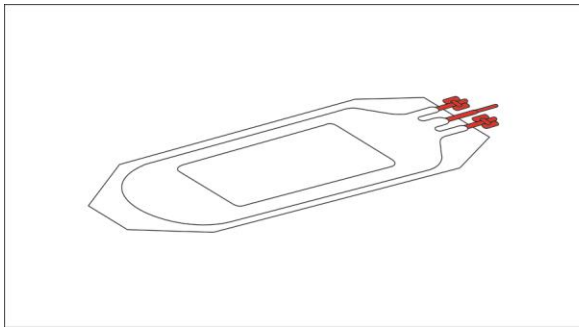

- **Silberplatten in den Aufnahmen immer sauber halten!**
- **Always keep the silver plates on the compartments clean!**
- **Nur Standardbeutel mit mindestens 100 ml Füllmenge und 15 mm – 36 mm Höhe einlegen!**
- **Insert standard bags only which contain at least 100 ml and measure 15 mm to 36 mm in height!**
- **Schläuche und Anschlüsse vollständig nach rechts und oben einlegen!**
- **When inserting bags, make sure hoses and connections are on the right-hand side, on the top of the bags!**
- **Schwenkeinheit nicht unter fließendem Wasser reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen!**
- **Never clean the rotating unit under running water or immerse it in liquids!**