
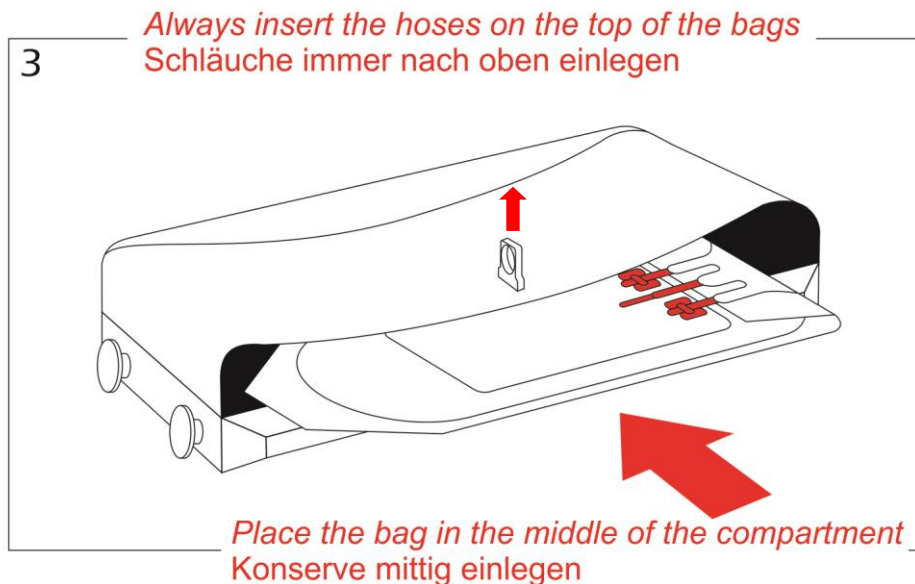
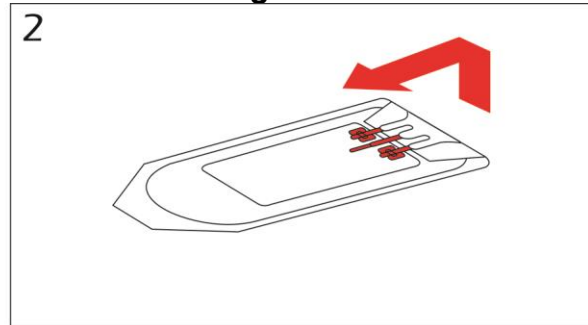


transfusio-therm[®] 2000

„Universal“

BITTE BEACHTEN! – ATTENTION PLEASE!

Beutel wie auf dem Piktogramm in den Halter legen!
Put the bag in the holder – like on the ideogram!

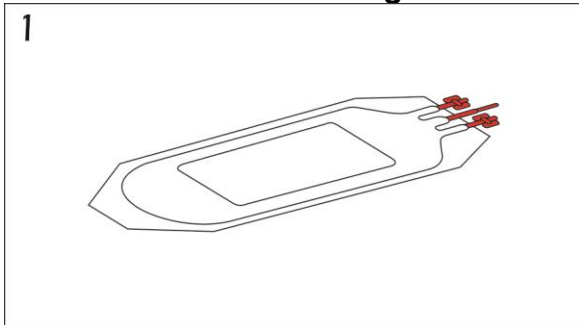

- Silberplatten in den Aufnahmen immer sauber halten!
- *Always keep the silver plates on the compartments clean!*
- Nur Standardbeutel mit mindestens 100 ml Füllmenge und 15 mm – 36 mm Höhe einlegen!
- *Insert standard bags only which contain at least 100 ml and measure 15 mm to 36 mm in height!*
- Pilotschläuche auf das mögliche Minimum kürzen!
- *Shorten pilot tubes to the minimum possible!*
- **Schläuche und Anschlüsse vollständig nach rechts und oben einlegen!**
- *When inserting bags, make sure hoses and connections are on the right-hand side, on the top of the bags!*
- Schwenkeinheit nicht unter fließendem Wasser reinigen und nicht in Flüssigkeiten tauchen!
- *Never clean the rotating unit under running water or immerse it in liquids!*